



Fabriqué en France



8 ATOUTS

- **Simplicité** d'utilisation
- **Rapidité** de mise en place
- Contrôle de la **température**
- Contrôle du débit et **consommation**
- Matelas résistant et **confortable**
- Utilisable comme douche ou **bain**
- Pas de réservoir à transporter
- Pas de système électrique/batterie

COULEURS DISPONIBLES



Conçu pour **la douche et le bain** des personnes alitées en collectivité ou à domicile. Douche au lit a été développé pour sa **facilité d'utilisation** par les soignants afin d'**améliorer le confort des patients**.



DOUCHE AU LIT

LA SIMPLICITÉ EN 4 ÉTAPES



1 **Raccorder** le flexible de douche




2 **Controler** la température de l'eau



3 **Positionner** le matelas sur le lit



4 **Utiliser** la douchette, c'est prêt !

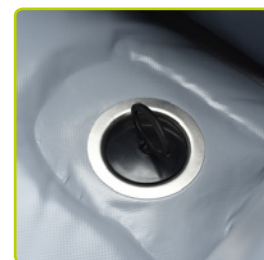

Pour donner un bain **utiliser le bouchon**

CONSEIL D'UTILISATION

Selon la quantité d'eau utilisée

- - de 23L vous pouvez **insérer le tuyau d'évacuation dans le réservoir** pour l'eau usée
- + de 23L vous devez **évacuer l'eau directement dans le siphon de la salle de bain** grâce au tuyau de 5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Existe en **1 longueur** 188 cm et **1 largeur** 88 cm - Fabrication sur-mesure possible



FLEXIBLE

Pas besoin de remplir de réservoir ou de brancher un système. Il suffit de changer le flexible de douche.

Longueur de base 5m avec possibilité de rallonge



DÉBITMÈTRE

Grâce au débitmètre intégré vous pourrez consulter la **quantité d'eau utilisée** et contrôler la **température de l'eau** en temps réel.

jma



SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET DURABILITÉ

Fabriqué avec un matériau **JMA Mousse** Certificat de qualité CTB 5672

Qualité certifiée par l'organisme **FCBA** en conformité au référentiel de la marque : **CTB Composites d'ameublement**

Référence	Longueur matelas bain (cm)	Largeur matelas bain (cm)	Hauteur côtés du bain (cm)	Hauteur rabats (cm)	Capacité réservoir (litres)	Flexible longueur de base (m)	Evacuation longueur tuyau (m)
DAL	188	88	44	60	23	5	5